

Vel'Phone®

SERVICE DE DÉTECTION
DU VÊLAGE




OU COMMENT RÉDUIRE LA MORTALITÉ ET MIEUX VIVRE LES VÊLAGES

Le vêlage est un moment clé dans la vie de votre élevage. Pour vous apporter le confort et la sérénité, à vous et à votre famille, Medria a créé une solution innovante. Grâce au Vel'Phone®, vous recevez des SMS qui vous permettent de surveiller la préparation au vêlage et d'être là au meilleur moment. Vous améliorez votre résultat avec plus de veaux vivants et moins de complications post-partum.



LE CAPTEUR Vel'Phone®

Le capteur Vel'Phone® est un thermomètre vaginal équipé de différents appendices selon les catégories d'animaux. Il mesure et enregistre la température et communique les données à la Box Medria®.

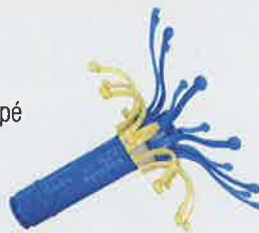

LES + Vel'Phone®

■ PRÉDICTION DU VÊLAGE

En plaçant le thermomètre vaginal quelques jours avant le vêlage, vous pouvez suivre l'évolution de la température jour après jour et recevoir un SMS de prédiction du vêlage. Vous avez ainsi le temps de placer l'animal dans les meilleures conditions pour que le vêlage se passe au mieux.


■ PRÉCISION DE LA DÉTECTION

Comme le thermomètre est expulsé avec la poche des eaux, vous savez précisément quand débute le vêlage pour laisser d'abord l'animal travailler, puis intervenir au meilleur moment afin de sécuriser le vêlage et donner les premiers soins au veau le plus rapidement possible. Vous choisissez le mode d'alerte SMS qui vous convient : instantané pendant la journée et avec un léger différé pendant la nuit.

■ SIMPLICITÉ D'UTILISATION

La mise en place du thermomètre est facile et se réalise seul. Le thermomètre posé, vous n'avez plus qu'à attendre les SMS dont vous aurez sélectionné les conditions de réception sur DWS®.

CYCLE D'UTILISATION DU Vel'Phone®

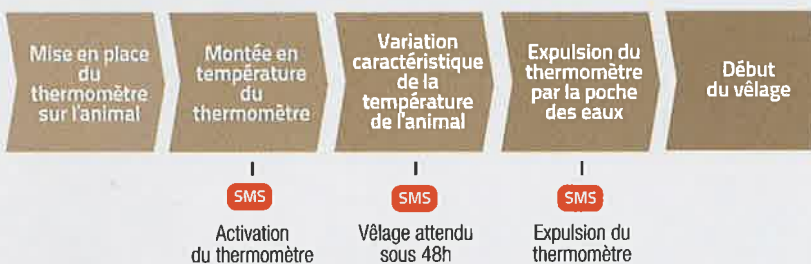

TV00AT1,
14/07/2014 10h49,
Expulsion

SERVICE 100% CONNECTÉ !